



УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ


1

1. Скачивание программы

- Перейдите по ссылке. Выберите папку, в которую вы хотите скачать программу-установщик, и нажмите «Сохранить».
- Подождите, пока программа загрузится на ваш компьютер.

2. Установка программы

- Запустите программу-установщик.

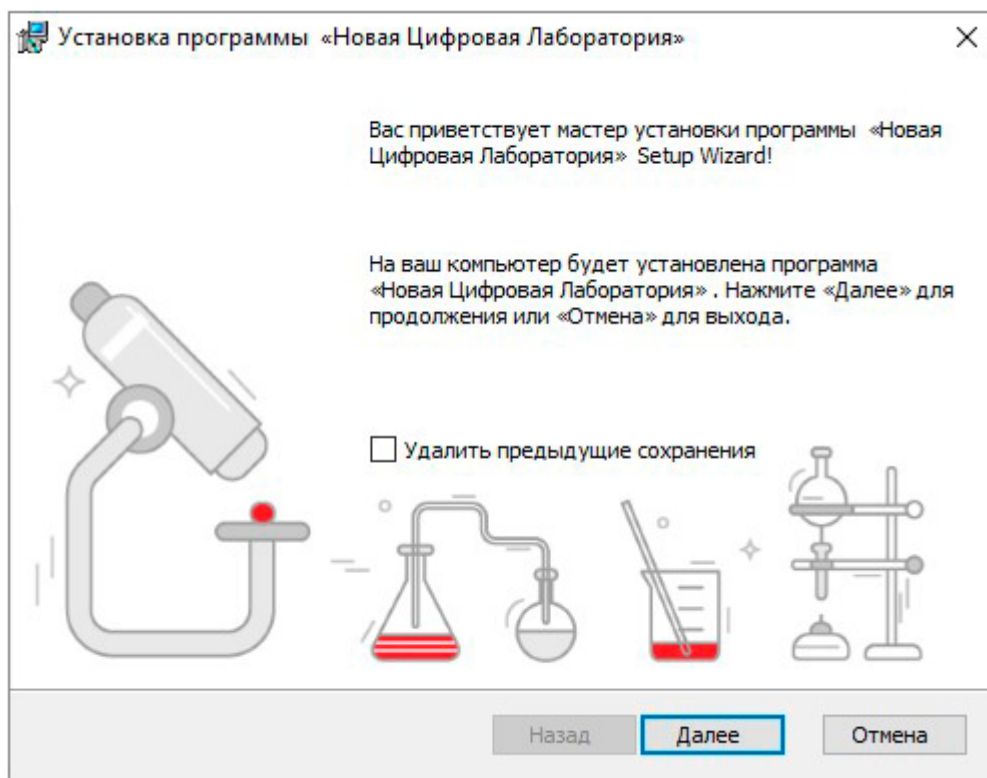


- Нажмите кнопку «Далее» внизу окна установщика. Откроется окно с Лицензионным соглашением.



УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

2

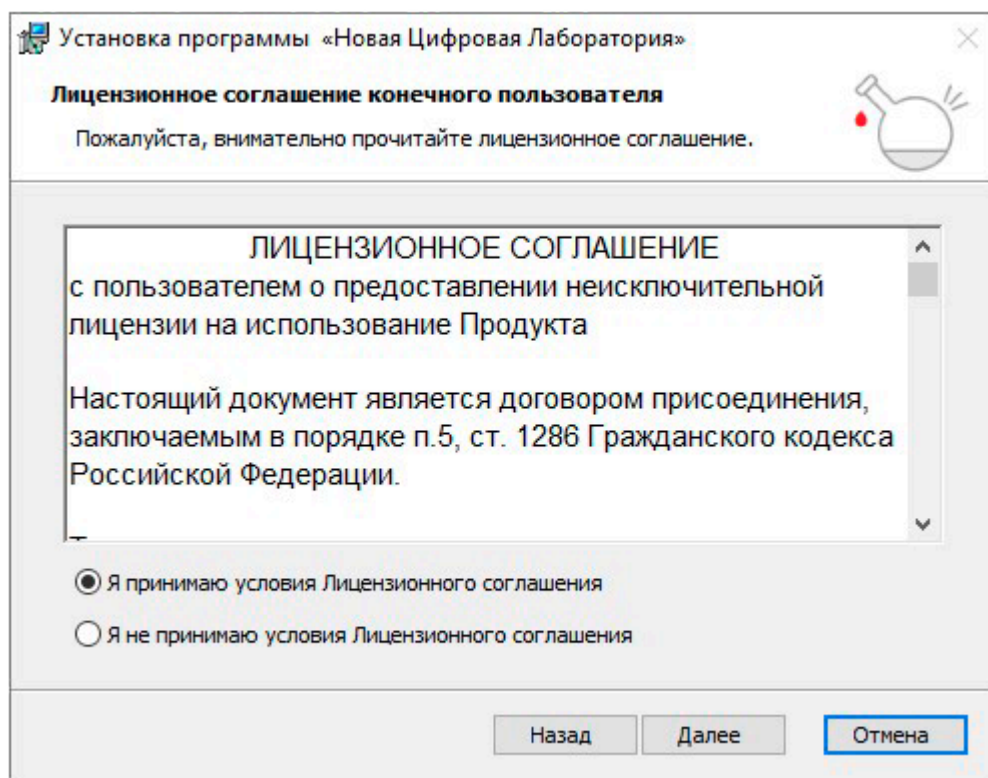


- Прочитайте Лицензионное соглашение. Поставьте галочку рядом с надписью «Я принимаю условия Лицензионного соглашения», чтобы кнопка «Далее» стала активной. Нажмите её.



УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

3

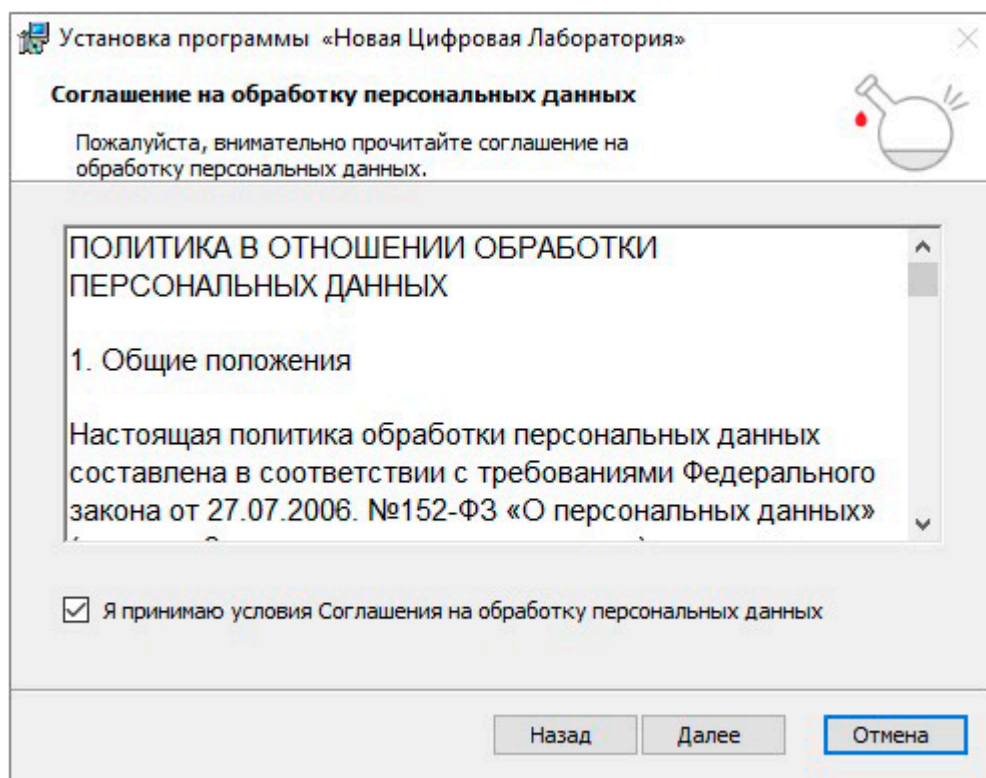


- Прочитайте Соглашение на обработку персональных данных. Поставьте галочку рядом с надписью «Я принимаю условия Соглашения на обработку персональных данных», чтобы кнопка «Далее» стала активной. Нажмите её.



УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

4

- В появившемся окне нажмите кнопку «Установить».

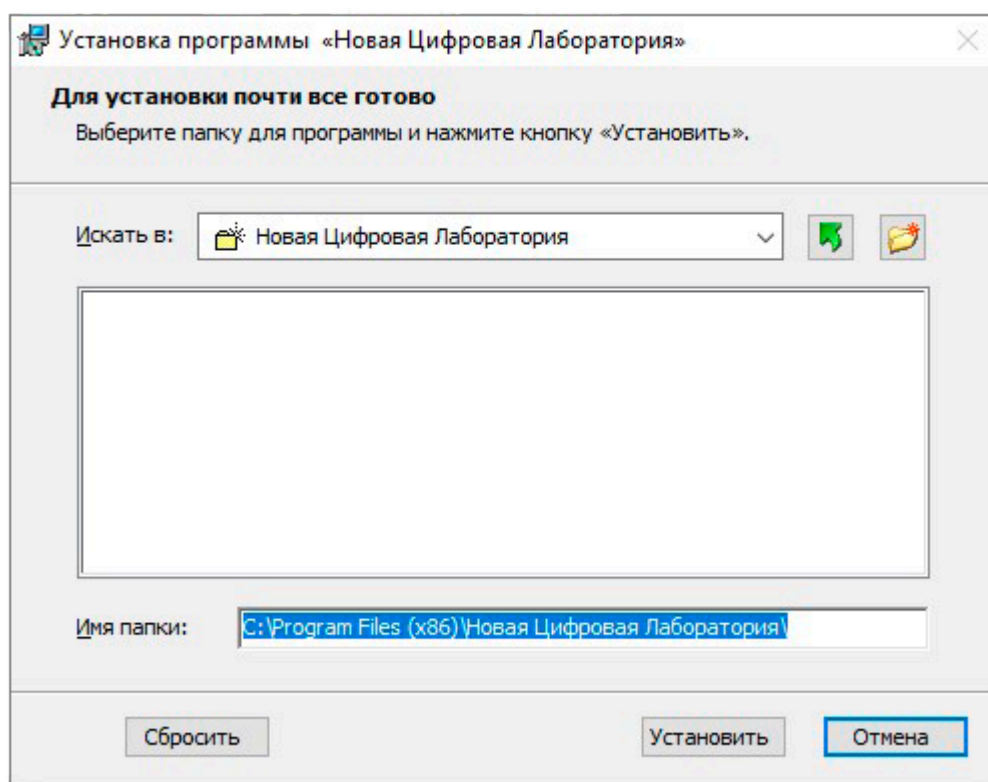


- Обратите внимание: Windows может попросить разрешения на установку. В этом случае необходимо нажать «Да».



УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

5

- Подождите, пока программа установится, и в появившемся окне установщика нажмите кнопку «Завершить».

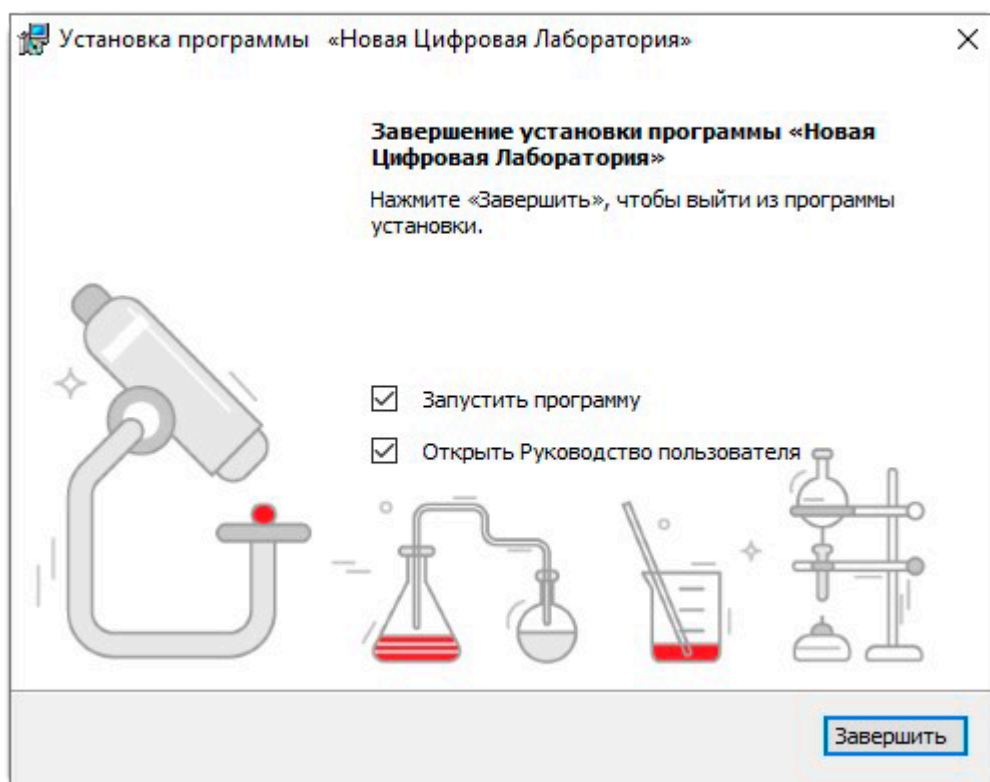

- Найдите на рабочем столе ярлык «Новая Цифровая Лаборатория» и дважды нажмите на него, чтобы запустить программу.
- Можно также оставить галочку в поле «Запустить программу» при завершении установки.